



NEW
ANCORVIS

Światowe rozwiązania
w Twoich rękach

Mamy ponad 70-letnie doświadczenie w branży dentystycznej

Założona w 1948 roku, firma New Ancorvis od wczesnych lat 2000. doświadczyła silnego rozwoju technologicznego, co pozwoliło jej wyróżnić się na rynku dentystycznym jako idealny i godny zaufania partner, oferując wciąż nowe rozwiązania dentystycznym i protetycznym.

Misja


Dzięki znacznym inwestycjom, nieustannym aktualizacjom oraz skonsolidowanej wiedzy, firma zdobyła renomę w wykorzystaniu technik frezarskich z użyciem **CAD-CAM** do produkcji półproduktów dla sektora stomatologicznego, przy jednoczesnym rozszerzaniu gamy wykorzystywanych materiałów. Firma podejmuje nowe wyzwania wdrażając nowe linie cyfrowe (**drukowanie 3D i chirurgia nawigowana**).

Wizja

Od początku swego istnienia naturalnym dążeniem firmy New Ancorvis jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przydatnych w sektorze dentystycznym. Nasz zespół dokłada codziennie wszelkich starań, aby sprostać potrzebom swoich partnerów w zakresie **rozwiązań cyfrowych i zapewnić niezbędne wsparcie gabinetom stomatologicznym i laboratoriom**, oferując skuteczne i praktyczne kursy szkoleniowe. Jako centrum produkcji i usług stomatologicznych, mocno zakorzenione na terytorium Włoch, New Ancorvis nigdy nie chciał zadowolić się granicami krajowymi, a teraz stara się sprostać nowym wyzwaniom w Europie i poza nią.

Linie produkcyjne

Technologia CAD CAM i elementy kompatybilne

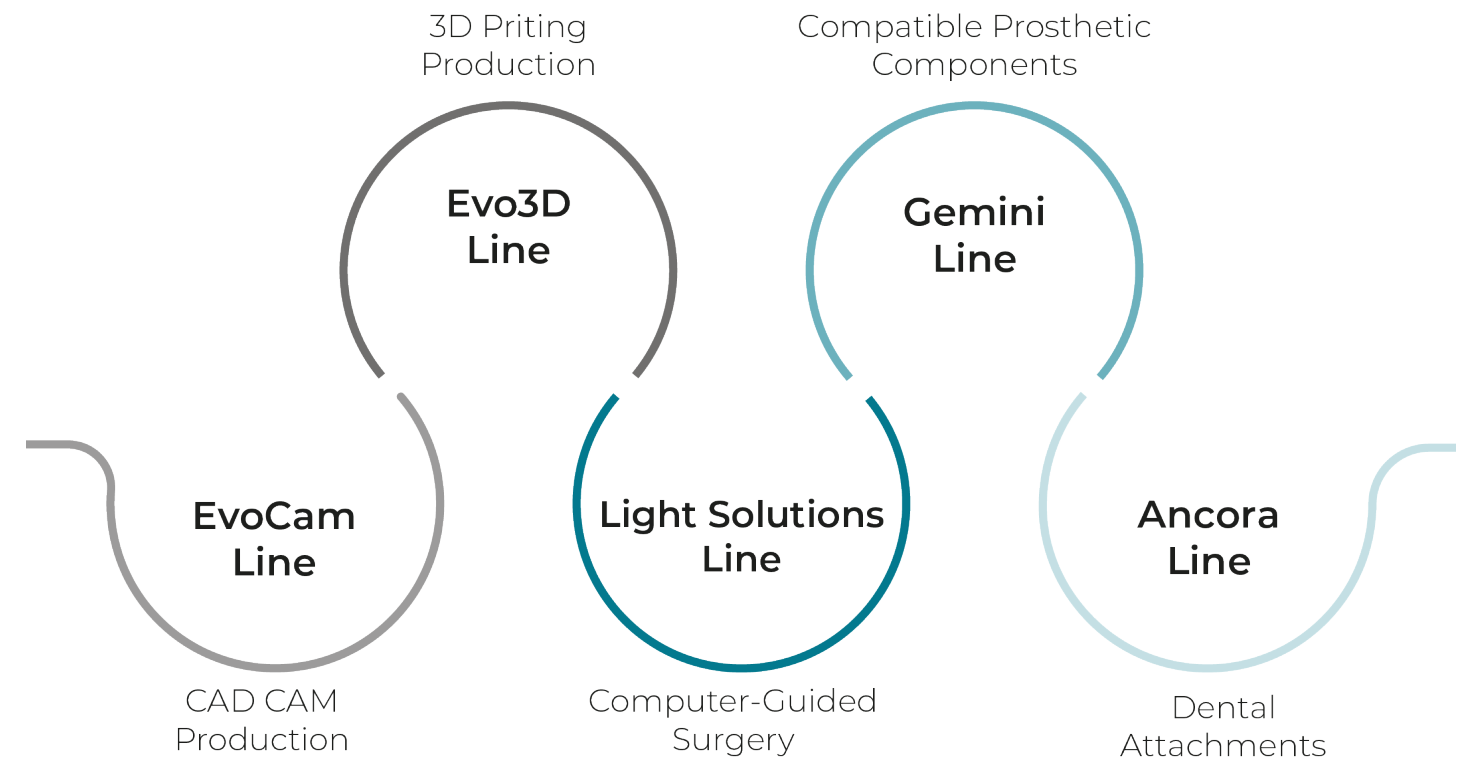

MBase Tech

Nowa generacja hybrydowych systemów produkcji



Zamówienia wysyłane w ciągu 24 godz

Nasz **opatentowany protokół hybrydowych systemów produkcji**, pozwala nam wykonywać zamówienia na łączniki oraz śruby do koron przykręcanych do implantu z wykorzystaniem technologii przyrostowych (selektywne stapianie laserowe) na wstępnie obrobione bazy (uzyskane drogą toczenia). Zapewnia to doskonale precyzyjne połączenia implantów zachowując wierność anatomii w obrębie protezy

■ Idealne odwzorowanie kształtów anatomicznych

Filar wykonany z tytanu st. 5 i stopu Cr-Co, techniką stapiania laserowego

■ CE-certified pre-machined connection implant connection obtained by turning

Sprawdź **łączniki dostępne w naszej ofercie!**



Oszczędność kosztów i materiałów w porównaniu do tradycyjnych metod obróbki

Aesthetic Duo

Inteligentne rozwiązania dla gabinetów i laboratoriów

Właściwości

■ **Belka przykręcana do implantów** i wykonana drogą selektywnego stapiania laserowego (SLM), z podparciem śluzowym i na dopasowanych łącznikach

■ **Frezowana nakładka z cyrkonu, kompozytu, PMMA** lub prototyp z żywicy na potrzeby testowania, do zamocowania na podbudowie

Anodowanie Kolorów



■ Frezowana nakładka



■ Belka spiekana laserowo

Najważniejsze fakty

New Ancorvis oferuje rozdzielczość plików

New Ancorvis wykonuje belki zawsze we własnym zakresie.

Plik do części estetycznej, CORE FILE, nadaje się do produkcji własnej lub do użytku w zaufanym centrum frezowania.

Slim Fit

Modern Bio Desgin

Dużo więcej niż Multi-Unit Abutment

Mniejsza i węższa budowa anatomiczna (4mm średnicy). Różne wysokości i nachylenia przezśluzówkowe: 0° - 17° - 30° z antyrotacją.


Śruba mocująca pozwala dokładnie odtworzyć połączenie z implantem, nawet w wersji prostych łączników. Powiększony otwór głowicy dostosowany do śrub o średnicy **M1.6**, dzięki czemu można je dokręcać do **25Ncm**.

Posiada **oznakowanie CE** i doskonale **integruje się z procesami cyfrowymi** (w tym z systemem INNOVA) i **obejmuje zestaw skanów wewnątrzustnych, analogów cyfrowych i bibliotekę CAD implantów**.

Non-engaging V4



Engaging V4

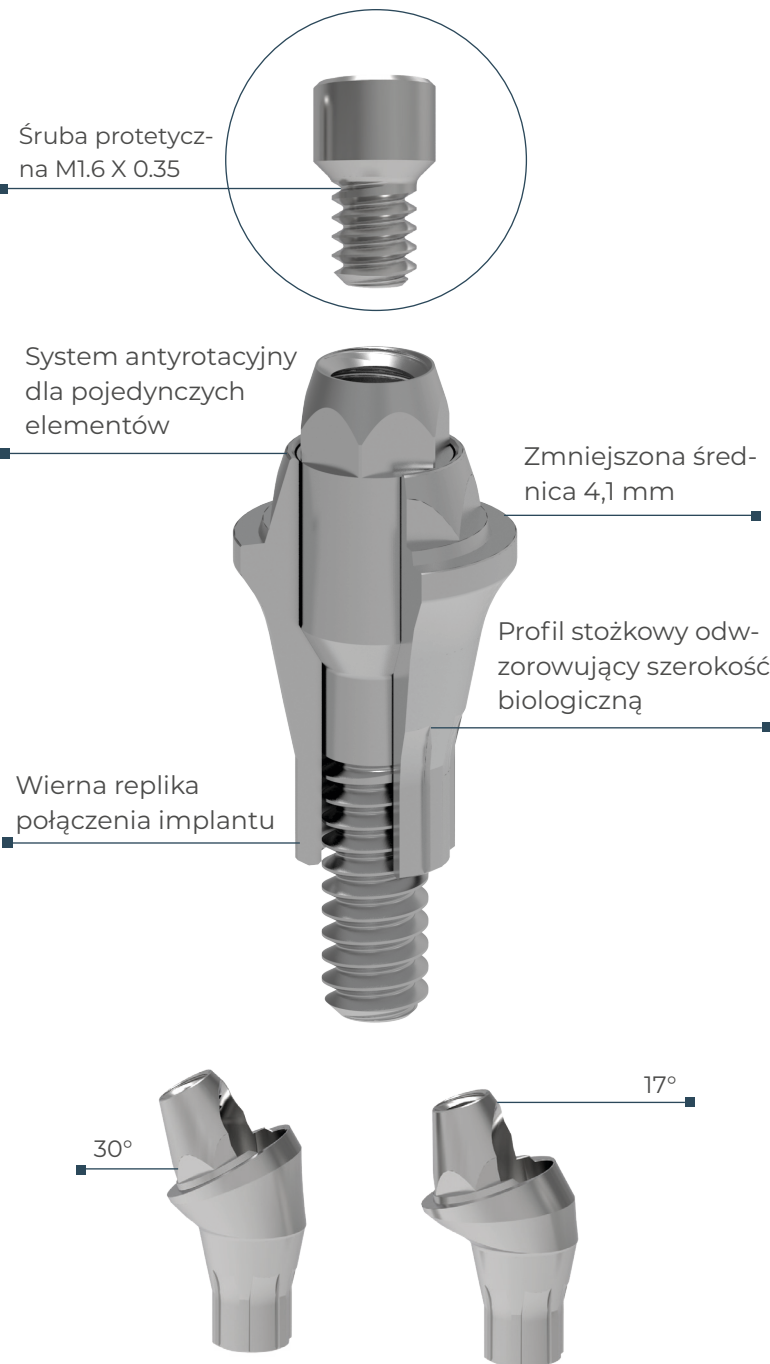

V4 Base

Pierwsza baza typu ti-base, która współtworzy system

V4 Base Akcesoria



V4 Regolo



V4 High Grip Screw



V4 Scan Marker

Trzon typu trilobed

- Antyrotacyjny
- Precyzyjne pozycjonowanie
- Równomierne rozłożenie cementu
- Dedykowane biblioteki

Zróżnicowana wysokość dziąseł ze specjalistycznymi plikami CAD ułatwiającymi doskonałe projektowanie protezy i właściwe wykonanie we własnym zakresie

Gwintowany profil kominowy

Pozwala wkręcić Ti-Base V4 do struktury zaprojektowanej metodą INNOVA.

- Nowa wysokość do 9,3 mm
- Wielofunkcyjny: tradycyjne techniki cementowania dla protez tymczasowych lub stałych oraz do wspomaganie komputerowego
- Zwiększona retencja

Profil Calyx do użytku doraźnego

- Kształt Calyx wspomaga wzrost tkanki i poprawia jakość objętości dziąseł;
- Optymalnie dopasowany do średnicy implantu;
- Powierzchnia w kolorze złota zapewnia doskonałą estetykę.



Innova System

Baza typu Ti-base **wkręcana** bezpośrednio w strukturę

Opatentowany system produkcji belek i mostów (łączniki bez hexowe) na podbudowie ze spiekane go tytanu, chromo-kobaltu, cyrkonu, PMMA.

Uproszczony proces produkcji: spreparowany gwint odpowiedni do zamocowania bazy Ti-base V4 w strukturze.

Estetyczne i funkcjonalne cechy: możliwość wyboru zmniejszonego kanału dostępowego do śrub, który umożliwia jedynie przejście końcówki śrubokręta, podczas gdy śruba pozostaje uwięziona wewnątrz struktury.


Stabilność w czasie: poprawa retencji mechanicznej do cementacji stanowi postę p w zarządzaniu zjawiskiem de-cementacji, które może wystąpić w trakcie użytkowania urządzenia

Wszystkie etapy cementowania i rozcementowania łączników do przyrządów zostały wyeliminowane

Połączenia chronione przed zjawiskiem utleniania zachodzącym podczas obróbki cieplnej



Akcesoria Innova

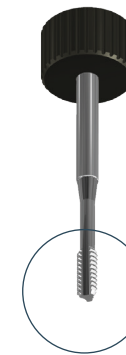

V4 Clean Tool:

- Do usuwania warstwy tlenku powstającej podczas obróbki cieplnej na metalach.
- Do czyszczenia gwintów w przypadku pyłu z spiekane go cyrkonu.
- Do szlifowania nieskomplikowanych gwintów w strukturach wykonanych za pomocą technologii druku 3D



V4 Pilot:

Zaprojektowany do dokręcania Ti-base z pomocą naszego analogu cyfrowego. Uniwersalny (dostosowuje się do każdego rodzaju analogu cyfrowego New Ancorvis).

Może być używany z kluczem dynamometrycznym lub bez niego

In-House Manufacturing

Protokół produkcyjny INNOVA jest zintegrowany z **Millbox** i **Hyperdent** i może być łatwo odtworzony w laboratorium za pomocą najpopularniejszych 5-osiowych frezarek dostępnych obecnie na rynku.

KORZYŚCI

Całkowita autonomia w **IN-HOUSE MANAGEMENT** struktur **PMMA** i **cyrkonu**.

Laboratoria wyposażone do produkcji wewnętrznej mogą liczyć na biblioteki implantów i dedykowane strategie frezowania, zestawy wiertel i akcesoria.




Passepartout

Szybkie cyfrowe zarządzanie przepływem pracy

Rewolucyjne oprogramowanie do skanera do **konwersji scanbody** i **zaawansowanego planowania protetycznego**

Właściwości

- **Konwersja:**
Wykonaj konwersję scanbody za pomocą trzech kliknięć!
- **Pozycjonowanie MUA:**
Umieść MUA bezpośrednio ze skanera wewnątrzustnego
- **Zindywidualizowane cyfrowe komponenty protetyczne:**
Za pomocą specjalnych narzędzi osiągniesz dokładną wysokość, średnicę i kąt indywidualnych elementów MUA
- **Wydajność:**
Automatycznie generowanie wtórnego scanbody na MUA;
Dokładne wartości referencyjne do natychmiastowego obciążenia.

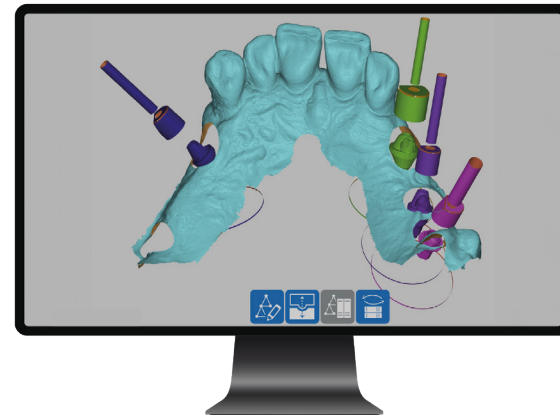

Get it now!



Create your own account



Visit our website



Book your library installation
appointment



Let's keep in touch!





Marwell

New Ancorvis Srl

Via dell'Industria, 15, 40012
Bargellino Calderara di Reno (Bo)
Tel. +39 320 056 6165
export@newancorvis.eu